

INSULINPUMPEN- VERSIONEN AUF EINEN BLICK



Software Version	Wave 1.0 (V1.06 – V1.07)	Wave 2.0 (V2.00)	Wave 2.1 (V2.01)	Wave 3.0 (V3.00)
Seriennummer	31025568 (und höher)	32005575 (und höher)	32100000 (und höher)	33000000 (und höher)
Max. Bolus (Insulineinheiten)	25	50	50	50
Tastensperre (Schritte zum Entsperren)	▲ + ▼ oder ▼ + ▲	▲ + ▼ oder ▼ + ▲	⦿ + ▲ + ▼ oder ⦿ + ▼ + ▲	⦿ + ▲ + ▼ oder ⦿ + ▼ + ▲
Tastensperrung in Sekunden	30	30	10	10
Quick Bolus (Werkseinstellung)	AN	AN	AUS	AUS
Quick Bolus (Option zur Aktivierung/Deaktivierung*)	NEIN	NEIN	JA (über Konfig. SW)	JA (über Konfig. SW und die Pumpe)
Zugang Quick Bolus Menü	⦿ 3 Sek.	⦿ 3 Sek.	⦿ 3 Sek.	⦿ 1 Sek. + 3 Sek.*
Bestätigung Quickbolus	-	-	-	⦿ 3 Sek.
Vibration der Pumpe bei Bolusabgabe über den Accu-Chek Insight Diabetes Manager	NEIN	JA	JA	JA
Zeit für Ampullenwechsel	15 Sek.	15 Min.	15 Min.	15 Min.
Anzeige Ampullenauswahl	vorgefüllt selbst befüllt	vorgefüllt selbst befüllt	vorgefüllt selbst befüllt	1,6 ml
Automatisches Füllen des Schlauchs nach dem Selbsttest während des Ampullenwechsels	Pumpe kehrt ins Menü „Ampulle & Infusionsset“ zurück			Nach dem Selbsttest Wechsel zu „Schlauch füllen“
Bestätigung vor Unterbrechung der Bluetooth-Verbindung	NEIN	NEIN	NEIN	JA**
Auf Pumpennachricht reagieren	⦿ + ⦿ lautlos und bestätigen		⦿ + Tastensperre lösen + ⦿ lautlos und bestätigen	
Verfügbarkeit Accu-Chek 360° Konfigurationssoftware	v2.0.1.2 DVD im Starterkit	v2.0.2.4 DVD im Starterkit	v2.2.0.5 DVD im Starterkit	v2.2.1.0 separater USB-Stick
Verfügbar (frühestens)	Okt. 2013	Feb. 2016	Feb. 2017	Dez. 2018

* Zuerst Taste drücken und lösen; dann sofort Taste erneut drücken und 3 Sekunden gedrückt halten.

** Die Pumpe fordert eine Bestätigung, wenn bei nicht gesperrten Tasten und aktiver Bluetooth-Verbindung die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wird.